



BRANCARDĂ TEXTILĂ PENTRU TRANSPORTUL RĂNIȚILOR MODEL OB

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



CITIȚI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE UTILIZARE!

1. Descriere

Dispozitivul a fost proiectat și implementat pentru transferul și / sau evacuarea pacienților. Dispozitivul nu permite imobilizarea coloanei vertebrale și nu trebuie utilizat la pacienții cu traumatism policromat cu leziuni ale aparatului osos sau coloanei vertebrale. Dispozitivul a fost proiectat în conformitate cu EN1865-1. Materialul din care este fabricat dispozitivul este de tip sintetic și rezistent la ardere (PVC).

2. Reacții adverse și contraindicații

Dispozitivul este conceput pentru a transporta pacienții cu o greutate maximă de 150 kg. Este clar că ridicarea și transportul trebuie să se efectueze în siguranță pentru pacient și pentru utilizatori, respectând prevederile legii privind siguranța muncii în vigoare în diferite state.

Dispozitivul nu generează efecte secundare, dar este contraindicat pacienților care au suferit leziuni ale coloanei vertebrale cervicale, bazei craniene și bazinului.

3. Garanția

Societatea Oscar Boscarol srl garantează dispozitivul o perioadă de 24 de luni de la data achiziționării de către utilizatorul original. De asemenea, garantează cumpărătorului absența defectelor materialelor și de fabricație ale brancardei textile pentru transport răniți OB.

Toate modificările cromatice și toate celelalte nereguli estetice care nu degradează caracteristicile și performanțele dispozitivului sunt excluse din garanție. Produsul care în timpul celor 24 de luni de garanție este găsit defect de către operator, trebuie trimis la Oscar Boscarol srl cu o notificare scrisă a presupusului defect descoperit. Oscar Boscarol srl va înlocui întregul dispozitiv, la discreția sa. Toate taxele poștale, de expediere, de vămire și de transport vor fi în sarcina cumpărătorului.

Referindu-se la ceea ce este descris în prezentele condiții de garanție, Oscar Boscarol srl nu poate fi tras la răspundere pentru daune accidentale sau indirecte, dacă au fost efectuate modificări, reparații sau intervenții tehnice neautorizate la dispozitiv sau o parte a acestuia a fost deteriorată prin accident, folosire și / sau folosire improprie. Nu există alte garanții exprese sau limitate privind vandabilitatea, adaptabilitatea sau de alt tip decât cele descrise în acest manual de utilizare. În scopul soluționării litigiilor, competența va reveni Tribunalului din Bolzano (Italia).

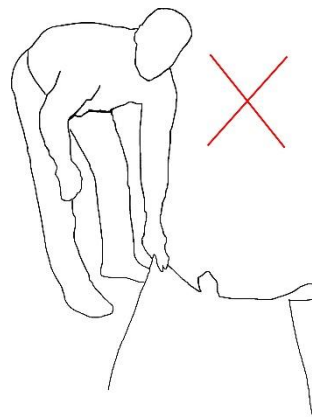
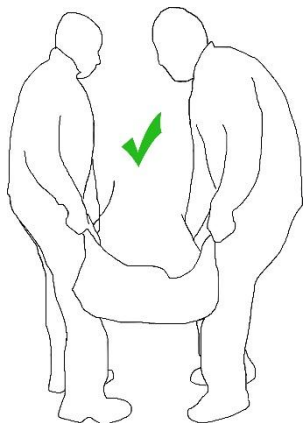
3. Utilizarea

Dispozitivul trebuie folosit întotdeauna de cel puțin 3 sau 4 persoane. Mânerile prevăzute de-a lungul părții longitudinale (6) și pe partea transversală (2) facilitează operațiile de ridicare și transport. Pânza trebuie ridicată numai când toți operatorii au prins mânerele. Ridicarea parțială pe o parte și / sau întinderea pânzei, prin târâre, poate provoca răni, pierderea integrității și poate deveni periculoasă pentru pacient și utilizator.

Nu ridicați niciodată pacientul trăgând pe pânză sau răsucind marginile extreme pe partea scurtă. Asigurați-vă întotdeauna că persoanele folosite pentru ridicare pot asigura un efort suficient pentru transportul pacientului. Utilizarea dispozitivului trebuie să fie limitată întotdeauna la transferul către alte dispozitive medicale mai stabile și mai sigure.

**ATTENZIONE:**

Nu depășiți niciodată greutatea maximă admisă de 150 kg! Nu ridicați sau atașați pânza la trolii sau sisteme de ridicare.

**3. Operațiuni de reutilizare**

La finalul utilizării dispozitivului este necesar să se procedeze la controlul și curățarea / dezinfectarea acestuia.

Verificați cu atenție cusăturile, destrămările sau rupele de material. Dacă aceste defecte sunt detectate, dispozitivul trebuie eliminat. Pentru curățare și dezinfectare se recomandă adoptarea unei practici medicale adecvate pentru în acest sens. Boscarol are dezinfectanți specifici de pulverizat și sub formă de șervețele umede care permit reducerea încărcăturii bacteriene și inhibă formarea mucegaiurilor, a virusilor și a altor forme periculoase de contaminare.

Durata de viață a dispozitivului, dacă este păstrat corect, este de 7 ani de la data fabricării.

4. Întreținerea dispozitivului

Nu există o întreținere periodică obligatorie a dispozitivului, deoarece acestea depind de cantitatea de muncă la care sunt supuse dispozitivele. Cu toate acestea, se recomandă să verificați periodic starea și rezistența acestuia prin verificarea celor descrise la punctul 3. Aparatul trebuie păstrat uscat și nu trebuie să existe mucegai atunci când este folosit.

Dacă dispozitivul nu este utilizat, acesta poate fi păstrat în saci de nailon, care ar trebui totuși să fie închiși și sigilați. Verificați periodic starea și absența mucegaiului sau a umidității care pot degrada dispozitivul. Dispozitivul nu poate fi reparat și, în caz de rupere sau destrămare parțială, trebuie eliminat.

5. Specificațiile tehnice și trimiterile la normele în vigoare

Clasificarea dispozitivului în baza Legii 46/97 (Directiva Europeană 93/42/CEE):

Conformitatea cu normele specifice:

Dimensiunile maxime ale brancardei textile pentru transport răniți:

Greutatea maximă a dispozitivului:

Toleranțe admise la toate unitățile de măsură:

Temperatura de funcționare:

Temperatura de depozitare:

Umiditatea relativă pentru depozitare:

CLASA I

EN1865-1

190x70 cm

1,4Kg

+/- 5%

de la -10°C la +50°C

de la -20°C la +60°C

de la 10 la 90%, fără condens

**Notă:**

Dispozitivul nu conține părți și / sau obiecte metalice care să compromită comunicările radio!



OSCAR BOSCAROL S.r.l.

Via E. Ferrari 29 – 39100 Bolzano – ITALY

Tel. 0471932893 - Fax 0257760140

e-mail: info@boscarol.it

